



nesplora



GIUNTI PSYCHOMETRICS

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Para poder usar los test del sistema Nesplora se necesita disponer de 4 elementos:

1. Dispositivo de Realidad Virtual [Meta Quest 2](#), [Meta Quest 3](#) o [Meta Quest 3S](#)
2. Ordenador, de mesa o portátil
3. Red Wifi, con conexión a internet
4. Auriculares de diadema, con cable

NESPLORA NO VENDE EL HARDWARE

ESPECIFICACIONES

1 Dispositivo de Realidad Virtual

[Meta Quest 2](#); [Meta Quest 3](#) o [Meta Quest 3S](#)

Disponibles con capacidad diferente (64, 128, 256 ó 512GB) en función del modelo.

La diferencia en la capacidad permite instalar más ó menos aplicaciones en el dispositivo, pero **cualquiera vale perfectamente para usar todos los test Nesplora**, que no ocupan más de 1 GB en el dispositivo.

¿Dónde los puedo comprar?

- En la [Web Oficial del fabricante META](#)
- En sus [Minoristas Autorizados](#), puedes consultar por país o región.



2 Ordenador, de mesa o portátil

Con las siguientes características

- **Sistema operativo:** Windows 10 ó superior, ó Mac OS X o superior
- **Memoria RAM** 4GB
- **Tarjeta gráfica:** Intel HD Graphics ó superior

Para la ejecución de los test del Sistema Nesplora no se necesitará de móvil

3 Red WIFI

Con conexión a internet

Gafas de realidad virtual y ordenador se comunican a través de las red wifi.

En el momento de aplicar los test, y en el momento de obtener el informe, tanto las gafas de realidad virtual como ordenador, deben estar conectados a la misma RED WIFI, con conexión a internet.

4 Auriculares de diadema

Con cable

Deben cubrir el pabellón auditivo para aislar suficientemente de ruidos externos.

Fácilmente ajustable para que se adapte a los distintos usuarios.

Con almohadillas, tipo piel o similar, con el objetivo de facilitar su limpieza y correcto mantenimiento.

Se conectarán por cable al dispositivo de Realidad Virtual. El tipo de entrada según modelo es:

- Para Meta Quest 2 y Meta Quest 3 → **jack estéreo 3,5mm** (conector más común en auriculares, el que solemos con frecuencia usar en móviles y ordenadores)
- Para Meta Quest 3S → **tipo C** (puede usarse el mismo auricular con conector jack estéreo 3,5 mm con un adaptador que convierta de jack estereo a tipo C


Es obligatorio el uso de auriculares conectados por cable al dispositivo de realidad virtual, para garantizar la inmersión auditiva y los tiempos de presentación de estímulos.

No pueden usarse auriculares inalámbricos para aplicar nuestros test.



CONTACTA CON NUESTROS
ESPECIALISTAS

customers@nesplora.com
+34 641430490
Agenda cita online

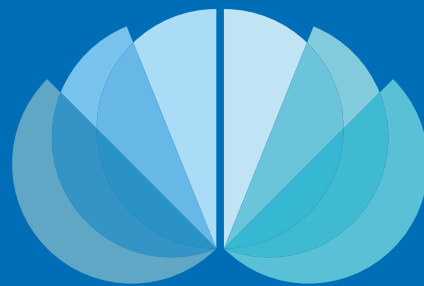

nesplora

PART OF

